

Verwendung: Materialtyp S-Monovette



Komplett-Set S-Monovetten:

- 1 Adapter
- 1 Schlauchkanüle
- 1 Serum Röhrchen
- 1 EDTA Röhrchen
- 1 Glucose Röhrchen

Legen Sie die Röhrchen bereit, die Sie zur Untersuchung brauchen.



Verbinden Sie vor der Punktion den Adapter mit der Schlauchkanüle.

Statt der Schlauchkanüle kann auch eine Standardkanüle mit Luer-Anschluss an den Adapter angeschlossen werden.




Punktieren Sie die Vene!

Bitte fixieren Sie anschließend den Schlauch am Arm des Patienten (z. B. mit einem Leukosilkstreifen) !



Sie können nun die erste S-Monovette an den Adapter ansetzen. Einschieben und leicht nach rechts drehen. Das System öffnet sich automatisch.

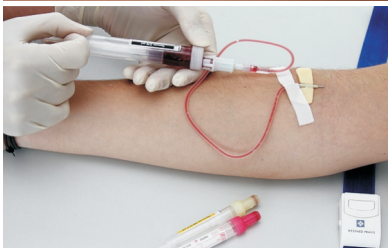

Ziehen Sie vorsichtig und nicht zu schnell an der Kolbenstange der Monovette. Ist die Monovette gefüllt, diese einfach aus dem Adapter nehmen - das System schließt sich automatisch. Schieben Sie nun nacheinander alle anderen Monovetten in den Adapter und verfahren in der gleichen Weise wie beim ersten Röhrchen.



Stauschlauch während der Entnahme lösen!!!

Bitte Kolbenstangen anschließend abbrechen (bis zum Anschlag ziehen, so dass eine Sollbruchstelle an der Kolbenstange frei wird!).



Die rote und die gelbe Monovette anschließend leicht schwenken!



Beschriften Sie die Röhrchen mit dem Namen des Patienten (Wasserfester Stift! Bitte keine Aufkleber verwenden!) und geben Sie sie anschließend in die Versandcontainer.

Bitte nie die Versandcontainer beschriften!