


Verwendung: Materialtyp Standard

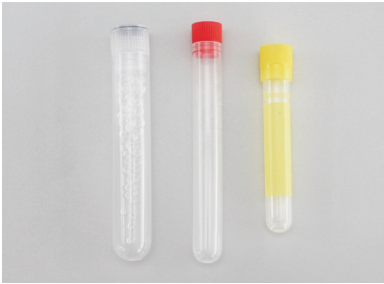

Komplett-Set Standard:

- 1 Serum Röhrchen
- 1 EDTA Röhrchen
- 1 Glucose Röhrchen

Legen Sie die Röhrchen bereit, die Sie zur Untersuchung brauchen.




Verwenden Sie eine 20ml Spritze mit Kanüle der Größe 1,1 (elfenbeinfarbig) oder 1,0 (gelb).

Punktieren Sie die Vene!
Ziehen Sie vorsichtig an der Kolbenstange der Spritze.
Stauschlauch während der Entnahme lösen!!!



Entfernen Sie die Kanüle und füllen Sie das Blut vorsichtig in die notwendigen Röhrchen.

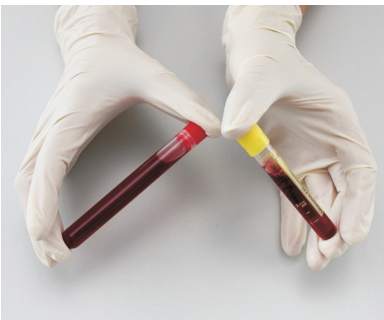

Rotes und gelbes Röhrchen anschließend leicht schwenken!



Beschriften Sie die Röhrchen mit dem Namen des Patienten (Wasserfester Stift! Bitte keine Aufkleber verwenden!) und geben Sie sie anschließend in die Versandcontainer.

Bitte nie die Versandcontainer beschriften!

