

Histamin im Stuhl

Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme sehr genau!


Nutzen Sie bitte für die Messung des Histamins im Stuhl ausschließlich das Testkit Histamin (TkHist) gemäß den unten aufgeführten Anwendungsvorschriften. Nur mit diesem Gefäß ist eine korrekte Messung des Histamins im Stuhl gewährleistet!



Die Pufferlösung muss auf jeden Fall im Röhrchen verbleiben!

Vor der Probenentnahme

Befestigen Sie vor Ihrem Stuhlgang die Stuhlfanghilfe gemäß der aufgedruckten Anleitung auf Ihrem WC-Sitz.

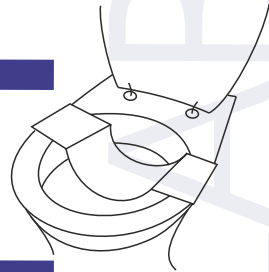


Verwendung Testkit Histamin (TkHist)

1. Nach Ihrem Stuhlgang schrauben Sie den gelben Dosierstab aus dem Röhrchen. Halten Sie dazu das Röhrchen am blauen Rand fest.

2. Stecken Sie die Spitze des gelben Dosierstabs **dreimal** in Ihren Stuhl, so dass sich **etwas Stuhl** in der Riffelung des Stabs sammelt.

3. Schieben Sie nun den Dosierstab zurück in das Röhrchen. Überschüssiger Stuhl wird beim Einschieben abgestreift, so dass eine genau definierte Menge Stuhl in die Pufferlösung des Röhrchens gelangt. **WICHTIG: Bitte versuchen Sie nicht, mehr Stuhl in das Röhrchen zu geben, als sich nach dem dreimaligen Einstechen auf der Spitze des gelben Dosierstabs befindet! Denn ist zu viel Stuhl im Röhrchen, kann der Test nicht durchgeführt werden!**

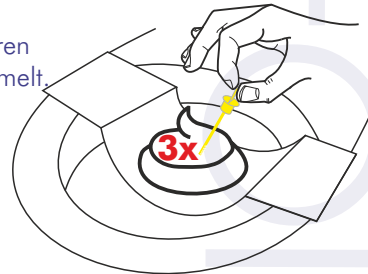

4. Drehen Sie den Dosierstab mit einer Rechtsdrehung fest, so dass er hörbar einrastet.

5. Schütteln Sie das Röhrchen so lange, bis der Stuhl aus der Riffelung in die Pufferlösung übergeht.

Versand Ihrer Stuhlprobe

Schreiben Sie (wasserfesten Stift verwenden) danach bitte Ihren Namen auf das Röhrchen, geben es in den Versandcontainer und schrauben ihn fest zu. Die Probe ist jetzt bereit für den Versand.