

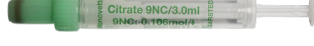
BLUTENTNAHME

Wahl der richtigen Monovette (Sarstedt)

So finden Sie die passenden Röhrchen zur ausgewählten Analyse:

1. Wählen Sie die gewünschte Analyse auf dem Auftragsformular oder im BIO-LABOR LIVE aus.
2. Prüfen Sie rechts im Auftragsformular das angegebene Materialkürzel und wählen Sie die passenden Röhrchen aus.

Beispiel: ☒ Basisuntersuchung (E+S+G) Hier wird 1x EDTA (E), 1x Serum (S) und 1x Glukose (G) benötigt.

KÜRZEL	FARBE	RÖHRCHENTYP	LABORWERTE	HINWEISE!
S		Serum Unzentrifugiert 	· Nierenwerte · Leberwerte · Hormonanalytik · Infektionsserologie	· 20-30 Minuten senkrecht gerinnen lassen · Zentrifugation in der Praxis empfohlen
		Zentrifugiert 		
E		EDTA 	· Blutbild · HbA1c	· Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden · Nicht zentrifugieren
G		Fluoride EDTA (Glukose) 	· Glukose	· Glycolysehemmer somit für keine anderen Parameter geeignet
SPH		Homocystein 	· Homocystein	· Zentrifugation in der Praxis empfohlen
H		Li Heparin liquid 	· Vollblutmineralanalyse	· Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden
S lichtgeschützt		Serum Unzentrifugiert 	· Vitamin A · Vitamin B3 · Vitamin C · Vitamin K	 · Röhrchen sofort nach Blutentnahme in lichtgeschützten Versandcontainer stecken
		Zentrifugiert 		
E lichtgeschützt		EDTA 	· Vitamin B1 · Vitamin B2 · Vitamin B6	 · Röhrchen sofort nach Blutentnahme in lichtgeschützten Versandcontainer stecken
SPA		Neutral 	· Aluminium	· Achtung: gleicht Serummonovette · Blutentnahme mit Spezialkanüle · Nicht zentrifugieren
Citrate		Citrat 	· D-Dimere · Fibrinogen	· Auf exakte Füllhöhe achten · Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden

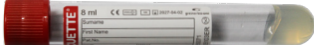
BLUTENTNAHME

Wahl der richtigen Monovette (Vacutainer)

So finden Sie die passenden Röhrchen zur ausgewählten Analyse:

1. Wählen Sie die gewünschte Analyse auf dem Auftragsformular oder im BIO-LABOR LIVE aus.
2. Prüfen Sie rechts im Auftragsformular das angegebene Materialkürzel und wählen Sie die passenden Röhrchen aus.

Beispiel: ☒ Basisuntersuchung (E+S+G) Hier wird 1x EDTA (E), 1x Serum (S) und 1x Glukose (G) benötigt.

KÜRZEL	FARBE	RÖHRCHENTYP	LABORWERTE	HINWEISE!
S		Serum 	· Nierenwerte · Leberwerte · Hormonanalytik · Infektionsserologie	· 20-30 Minuten senkrecht gerinnen lassen · Zentrifugation in der Praxis empfohlen
E		EDTA 	· Blutbild · HbA1c	· Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden · Nicht zentrifugieren
G/SPH		Glukose/Homocystein 	· Glukose · Homocystein	· Zentrifugation in der Praxis empfohlen
H		Li Heparin liquid 	· Vollblutmineralanalyse	· Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden
S lichtgeschützt		Serum 	· Vitamin A · Vitamin B3 · Vitamin C · Vitamin K	 · Röhrchen sofort nach Blutentnahme in lichtgeschützten Versandcontainer stecken
E lichtgeschützt		EDTA 	· Vitamin B1 · Vitamin B2 · Vitamin B6	 · Röhrchen sofort nach Blutentnahme in lichtgeschützten Versandcontainer stecken
Citrate		Citrate 	· D-Dimere · Fibrinogen	· Auf exakte Füllhöhe achten · Gerinnung durch sofortiges Schwenken vermeiden

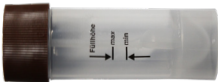
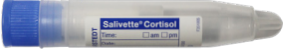
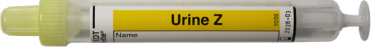
PROBENENTNAHME

Wahl der richtigen Materialien

So finden Sie die passenden Röhrchen zur ausgewählten Analyse:

1. Wählen Sie die gewünschte Analyse auf dem Auftragsformular oder im BIO-LABOR LIVE aus.
2. Prüfen Sie rechts im Auftragsformular das angegebene Materialkürzel und wählen Sie die passenden Röhrchen aus.

Beispiel: ☒ STP1 + ☐ Pilztypisierung **(STR+STB)** Hier wird 1x Stuhlröhrchen rot (STR) und 1x Stuhlröhrchen braun (STB) benötigt.

KÜRZEL	FARBE	RÖHRCHENTYP	LABORWERTE	HINWEISE!
STR		Stuhlröhrchen rot 	· Pilzdiagnostik/ Dysbiose mit oder ohne Pilztypisierung	· Auf Füllhöhe achten
STB		Stuhlröhrchen braun 	· Darmschleimhautdiagnostik · Parasiten	· Auf Füllhöhe achten
TKHIST		AminoExtrakt 	· Histamin	· Nur die Rillen des orangenen Stäbchens befüllen · Eine Über- oder Unterfüllung verfälscht die Messwerte
TKHb		FD Schnelltest Röhrchen 	· Hb/Hp Komplex	· Eine Über- oder Unterfüllung verfälscht die Messwerte
SL		Salivette Cortisol 	· Cortisol im Speichel	· Eine Über- oder Unterfüllung verfälscht die Messwerte
U		Urine Z 	· Osteoporosemarker · Urinsediment · Nitritprobe	· Eine Unterfüllung verfälscht die Messwerte
TBT		DrySpot   Außen Innen	· Trockenblut Vit. D · Trockenblut DAO	· Pro Parameter 2 Felder füllen · Filterpapier durchtränken · Eine Unterfüllung verfälscht die Messwerte
TKK lichtgeschützt		Kryptopyrrol 	· Kryptopyrrol	· Röhrchen sofort nach Urinentnahme in lichtgeschützten Versandcontainer stecken · Eine Unterfüllung verfälscht die Messwerte

